

FFP2 NR Filternde Atemschutzmaske

Enhe-01 oder YY01

CE 2163 oder CE 0598 EN149:2001+A1:2009

Gebrauchsanweisung:




1 Die Maske an den Ohrenschlaufen (Nasenclip oben) gegen das Kinn ansetzen und über die Nase ziehen.



2 Drücken Sie den Nasenstreifen zusammen, um ihn an die Form der Nase anzupassen.



3 Die Ohrschlaufen über die Ohren ziehen.

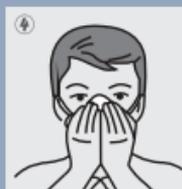

4 Prüfen Sie die Passform um die Dichtheit sicherzustellen. Gegebenenfalls Nasenclip nochmals am Nasenrücken durch andrücken korrigieren.



siehe die vom Hersteller bereit gestellten Informationen



minimaler (-30 °C) und maximaler (+40°C) Lagertemperaturbereich



maximale (<80%) relative Feuchtigkeit der Lagerumgebung



siehe auf der Maske
see on the Mask



5 Jahre ab Herstellungsdatum
5 years from date of manufacture

Art.No.: TSM101



9 120064 770259

EU Vretung: True Sky HandelsgmbH
T: +43 720788630
E: office@true-sky.com
W: www.true-sky.at