

FFP2 NR Filternde Atemschutzmaske

CE 0598 EN149:2001+A1:2009

YY01

Gebrauchsanweisung:




1 Die Maske an den Ohrenschlaufen (Nasenclip oben) gegen das Kinn ansetzen und über die Nase ziehen.



3 Drücken Sie den Nasenstreifen zusammen, um ihn an die Form der Nase anzupassen.



2 Die Ohrschlaufen über die Ohren ziehen.

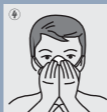

4 Prüfen Sie die Passform um die Dichtheit sicherzustellen. Gegebenenfalls Nasenclip nochmals am Nasenrücken durch andrücken korrigieren.



siehe die vom Hersteller bereit gestellten Informationen



minimaler (-30 °C) und maximaler (+40°C) Lagertemperaturbereich



maximale (<80%) relative Feuchtigkeit der Lagerumgebung



siehe auf der Maske
see on the Mask



Art.No.: TSM101/50



6 Jahre ab Herstellungsdatum
6 years from date of manufacture

EU Vretretung: True Sky HandelsgmbH
T: +43 720788630
E: office@true-sky.com
W: www.true-sky.at



Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Umweltschadstoffe die Gesundheit ernsthaft gefährden oder die Sauerstoffkonzentration unter 18% liegt.
2. Wenn das Produkt beschädigt ist oder der Atemwiderstand zunimmt, ersetzen Sie es bitte rechtzeitig.
3. Wenn Sie sich beim Atmen unwohl fühlen, Schwindel, Übelkeit usw. verspüren, sollten Sie einen sicheren Ort aufsuchen um dies sofort zu überprüfen und auszuruhen.

Warnung

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellt.

Erklärung medizinischer Symbole



Nicht zur Wiederverwendung



Verwendbar bis Dauer steht auf der Maske.



Herstellungsdatum Datum steht auf der Maske.