

# FFP3 NR Filternde Atemschutzmaske

JH

CE 0370

EN149:2001+A1:2009


## Gebrauchsanweisung:




1 Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn und den Nasenbügel über die Nase.



3 Formen Sie den Nasenbügel über das Nasenbein.

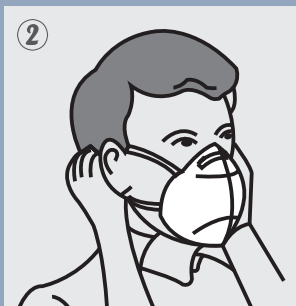


2 Ziehen Sie die Bänder über beide Ohren.

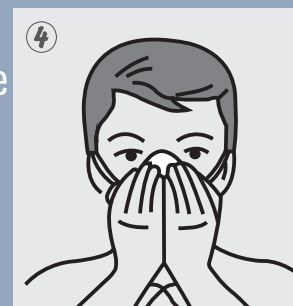

4 Drücken Sie nun die Maske mit beiden Händen gegen das Gesicht. Die Maske soll eng am Gesicht aufliegen.



siehe die vom Hersteller bereit gestellten Informationen

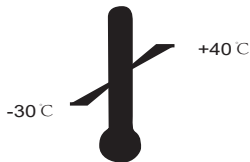

minimaler (-30 °C) und maximaler (+40°C) Lagertemperaturbereich



maximale (<80%) relative Feuchtigkeit der Lagerumgebung



siehe auf der Maske  
see on the Mask



6 Jahre ab Herstellungsdatum  
6 years from date of manufacture

Art.Nr.: TSM108

EU Vetretung: True Sky HandelsgmbH  
T: +43 720788630  
E: office@true-sky.com  
W: www.true-sky.at

